

ダニスキャンの使用法

これがダニスキャン。
検査1回分のキットです。



使用する直前にアルミ袋から本体（ちり採取器）を取り出して下さい。（本体は湿気を嫌います）

ちり採取器の採取部（黄色突起部）が下になるように人差し指を反対側の窪みにあてて持ちます。



測定したい範囲 1 m²をジグザグに1分間まんべんなくこすって下さい。

（過度にこすると測定対象物の繊維を傷める場合があるので注意して下さい）




採取部を上にして本体を水平な場所に置きます

現像液の容器頭部をねじり取り、採取部から約1 cm 離して、現像液を5～6滴たらしめます。



約15分後に判定します

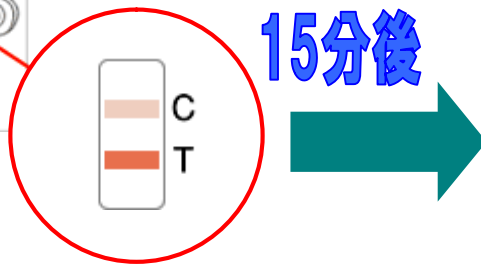

判定1 Tの線が出ずに、Cだけ濃く出る。



ダニアレルゲンによる
汚染はありません。

判定2 Cの線がTの線より濃い。



多少汚染されています。

判定3 2本の線の濃さが同じ。



ダニアレルゲンによる
汚染が進んでいます。

判定4 Tの線がCの線より濃い。



非常に汚染されています。